


< 取扱説明 >

- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえ押し洗いし、水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等が付着した場合は洗い流してください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で使用又は長時間放置しないでください。
- 薬剤や漂白剤などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- ループの結合部分は、とても繊細に作られています。衣類などに引っかかり強く引っ張ったりすると、結合ピンの破損の恐れがあります。
お取扱いには十分注意していただきますようお願いいたします。
- 長くご使用いただくため、入浴時は外してください。
- 製品に、頭髮剤・整髪スプレー・化粧品・毛染め剤・香水などが直接付着しないようにご注意ください。樹脂部分に変色する恐れがあります。

〔留め具のはずし方・留め方〕

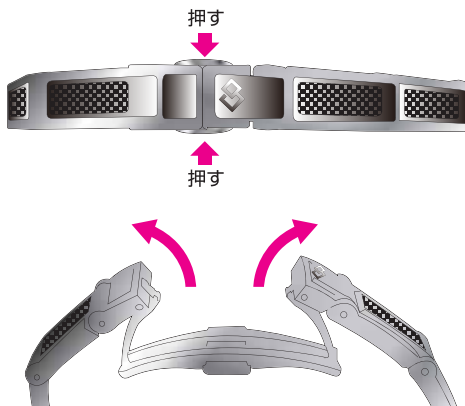

留め具のつまみを矢印の方向に押すと、留具が左右に開き外れます。

装着時は左右に開いた部分を元に戻しカチッと音がするまでしっかり留めて下さい。