



磁気ランバーサポートのご使用方法

【椅子に取り付ける場合】

- 1 椅子の背もたれにクッション部分を前面にし背もたれの後ろ側で固定します。

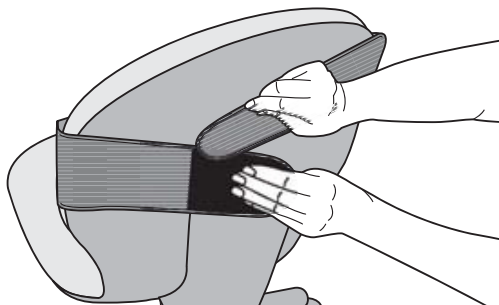

- 2 取り付けしたクッションに腰椎部が当たるように背筋を伸ばして腰掛けます。

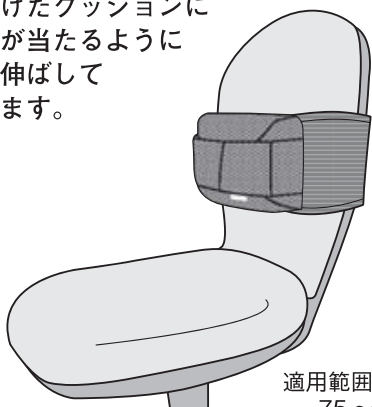


適用範囲：イス圏
75 ~ 125cm

※位置を調整する際は一度はずして、つけ直してください。
※運転に影響がある場合は、使用を控えてください。

【体に装着する場合】

- 1 腰椎部にクッション部分をあてベルトの右側を左側の面ファスナーで固定します。

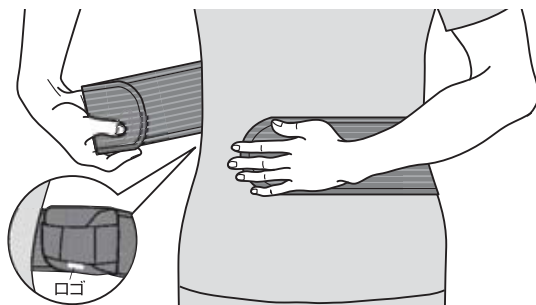

ロゴのある面を腰にあてる


- 2 椅子に腰掛け背筋を伸ばして背もたれにもたれます。



適用範囲：腹囲
60 ~ 100cm
※ベルトが届かない場合は
エアークッションの
空気を抜いてください。

●エアークッション操作方法

つまみ部を押すことでクッション内の空気を調整することができます。

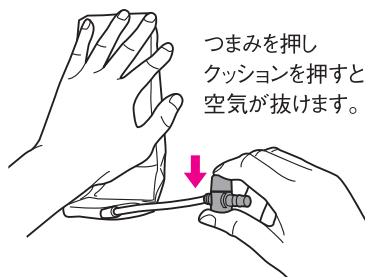


つまみ押し
クッションを押すと
空気が抜けます。

空気の抜けた
クッションはつまみ
を押すだけで空気が入り
厚みが復元します。

●カバー洗濯可能

磁石シートとカウンタークッション、エアークッションを取り外すとカバーを丸洗いができます。

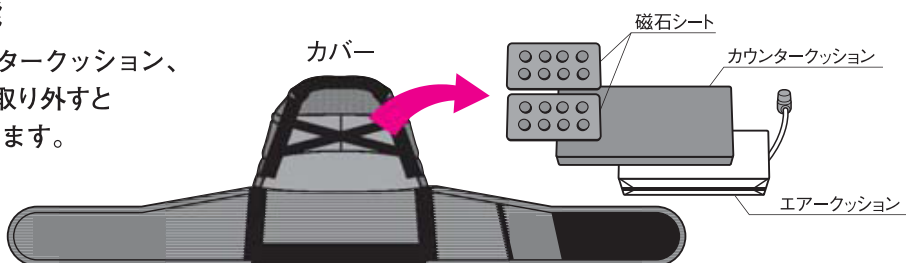


磁気ランバーサポートのご使用方法


【椅子の背もたれに置いて使用する場合】

椅子の仕様によっては本商品を取り付けられない場合があります。
その場合、下記の要領にて使用してください。
(本体パット幅より狭い椅子には使用できません)


- 1 本体を裏返し、ベルトの左右を手前に折り
面ファスナーの端同士で止めます。

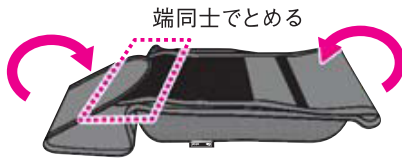

- 2 左側を折返し
ゴム部分に挟み込みます。

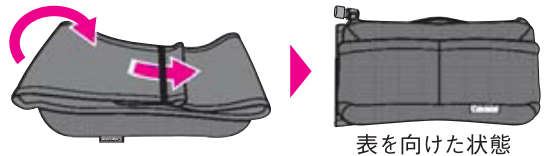

- 3 椅子に腰掛けて
クッションが腰椎部に
あたるように位置を
調整します。

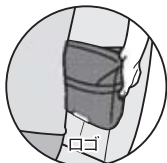

ロゴのある面を
腰にあてる






- 4 クッションを体で
固定しながら
背もたれにもたれて
使用してください。



カバー洗濯後の各部分セット方法


- ①まず、カバー部分に
エアークッションを挿入します。

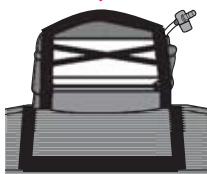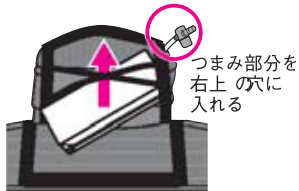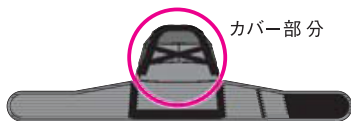

- ②続いてエアークッションの上に
カウンタークッションを重ねて
固定します。



- ③エアークッションのつまみ部分を
サイドポケットに収納し、
磁気シートを前面ポケットに
挿入してください。

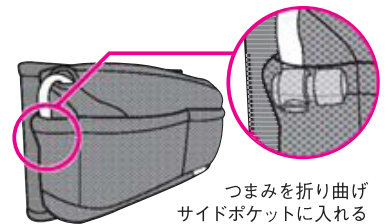

磁石がある面を表にし
前面ポケットに挿入

