
取扱説明書

【ご使用方法】

- ・ 枕は、磁石シートを入れるポケットがある面が、表面になります。
- ・ 磁石シートは、磁石による突部がある面が、表面になります。
- ・ 枕のポケットに磁石シートを入れてお使いください。
- ・ 専用の枕カバーを装着してお使いください。
- ・ 3枚の磁石シートは、首と両肩に当たるように、トライアングル状に配置しています。ご使用時は、枕の上に仰向けになって頭を乗せていただき、各磁石シートが首と両肩に当たるように、頭の位置を調整してください。
(枕カバーに縫い付けてあるネームタグは、頭頂部を置く位置の目印になっています。)
- ・ 枕の中素材は、あらかじめ多めに充填しています。高さが高く感じられる場合は、ファスナー口から中素材を取り出し、お好みに合わせて調整してください。

【ご使用上のご注意】 ※ご使用前に必ずご確認ください。

- ・ 常に乾燥した状態で使用してください。
- ・ 折り曲げたり、強く圧迫することは避けてください。
- ・ 火気を近づけないでください。火災や火傷の原因となります。
- ・ 改造等を行わないでください。
- ・ 当製品は、添付文書をご覧くださいの上、正しくご使用ください。
- ・ 使いはじめは、まれに首や肩に違和感を感じる場合があります。しばらくご使用いただき、痛みや違和感が残る場合は使用を中止してください。
- ・ 磁石の突部が首や肩に長時間触れることでその部位に痛みや違和感が残るようであれば、使用を中止するか、タオルなどをまくらカバーの上に掛けてご使用ください。
- ・ 中素材に他の素材を混入されますと、マグーラ本来の機能性や感触が損なわれる可能性がございますので、エルゴビーズ以外の素材は充填しないでください。
- ・ 横向き、うつぶせで寝ることが多い方は、就寝時、首や肩に磁石シートが当たりにくいので、ご注意ください。
- ・ 磁気製品（ネックレスやベルト、肌着など）の使用時に、違和感を感じたことのある方は、ご注意ください。

【洗濯上のご注意】

- ・ 枕本体をお洗濯される際は、磁石シートを枕本体から取り外してください。
※磁石シートは洗濯できません。
- ・ 枕本体は、手洗い可能です。洗濯表示に従い、お手入れをしてください。(洗濯機、乾燥機は使用しないでください。)
- ・ 枕カバーは、ご家庭の洗濯機で洗濯可能です。洗濯表示に従い、お手入れをしてください。