

マグチタン NEO レジエンド

取扱説明書



Colantotte®

<製品についてのお問い合わせは下記まで>

arc Quest

製造販売元 **株式会社アーク・クエスト**
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26
TEL(06)6258-7350 FAX(06)6258-7360
http://www.colantotte.jp ☎ 0120-080-523



2次元
バーコード

コラントッテは模倣品対策に真贋判定・トレーサビリティシステムを導入しています。パッケージにある2次元バーコードの番号をコラントッテのホームページ上の真贋判定サービスに入力することで、商品固有の正式番号か、不正にコピー・捏造された番号かを瞬時に判別できます。
http://trace.colantotte.jp

MA01_R01

■「マグチタン」は医療機器です。

「マグチタン シリーズ」は医療機器として認証されています。100mTのフェライト永久磁石をN極S極交互配列で埋め込み、装着部位の血行を改善し、コリを緩和します。

■純チタン採用



バングルとフェイスには、身体に優しい純チタンとステンレスを使用しています。どちらも耐食性に優れ錆びにくい特長があり、スポーツシーンでも安心してご使用いただけます。「マグチタン シリーズ」は世界で活躍するアスリート達に愛用されています。

■独自のN極S極交互配列

N極とS極を交互に配列することにより、広範囲に磁力が影響します。これがコラントッテの磁気パワーの特長です。




■サイズ調整の仕方

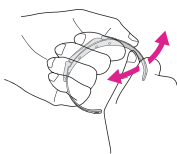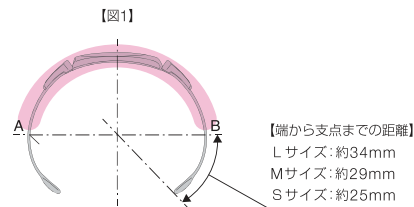

【図2】

図2のように本体を強く握り(図1の赤色部分を握る)、図1にあるA・Bを赤点に曲げてください。

大きくする場合は外側に、小さくする場合は内側に曲げます。

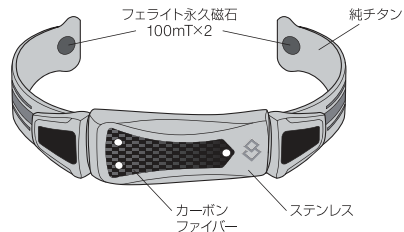

■製品仕様

Spec: フェライト永久磁石100mT(1000G)2個を交互配列
Material: 純チタン、ステンレス、カーボンファイバー、エポキシ樹脂
Size: Sサイズ13~16cm, Mサイズ16~19cm, Lサイズ19~21.5cm
医療機器認証番号: 221AGBZX00162A02

■使用方法

腕に密着させて使用してください。

(※本製品はプレスレットなど手首に使用する機器及び足首に使用する機器ではありません)

■サイズ調整の仕方(続き)

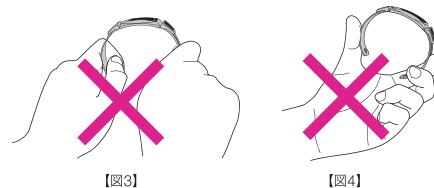


図3、4のように誤った方法でサイズ調整を行った場合、破損する原因となります。

■ご使用上の注意

●装着時にかゆみなど異変を感じたら、装着を中止してください。●汚れや汗などが付着したまま使用および保管しないでください。●ぬれた状態で長時間放置または使用しないでください。●長くお使いいただくため、温泉、サウナ、プール、海水、風呂、シャワーなどのご使用はお控えください。●着け外しの際は、強く引っ張ったり、無理に押し込んだりしないでください。本体の破損や、肌を傷つける恐れがあります。●高温のものへ近づけることはお避けください。●漂白剤、洗濯機、乾燥機などは使用しないでください。●汚れなどは柔らかい布で拭き取ってください。●汚れのひどい時は中性洗剤を使用し、水で十分に洗い流した後、柔らかい布で拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。●シンナーやベンジンなど有機溶剤でのお手入れはお避けください。