


# カーフサポートタイツのご使用方法

- 1** サポーター上部内側に商品名のイニシャル(C)とサイズ、着用方向(右・左)が編み込まれていますので、着用方向(右・左)をご確認ください。

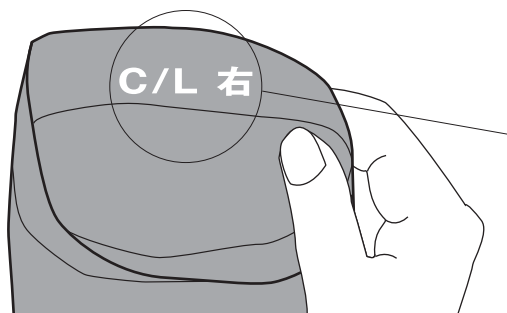

商品名のイニシャル  
(Calf support tights)  
**C/L 右**  
サイズ 着用方向


サポーターの上部内側に左のように商品名イニシャル、サイズ、着用方向が編み込まれています。

- 2** ♡のマークのある方が前面です。♡のマークが前中心にくるように装着してください。後ろは、ふくらはぎ下部中央に磁石部分があることを確認してください。

前面

後面

♡マークが上部正面にくるように装着してください。

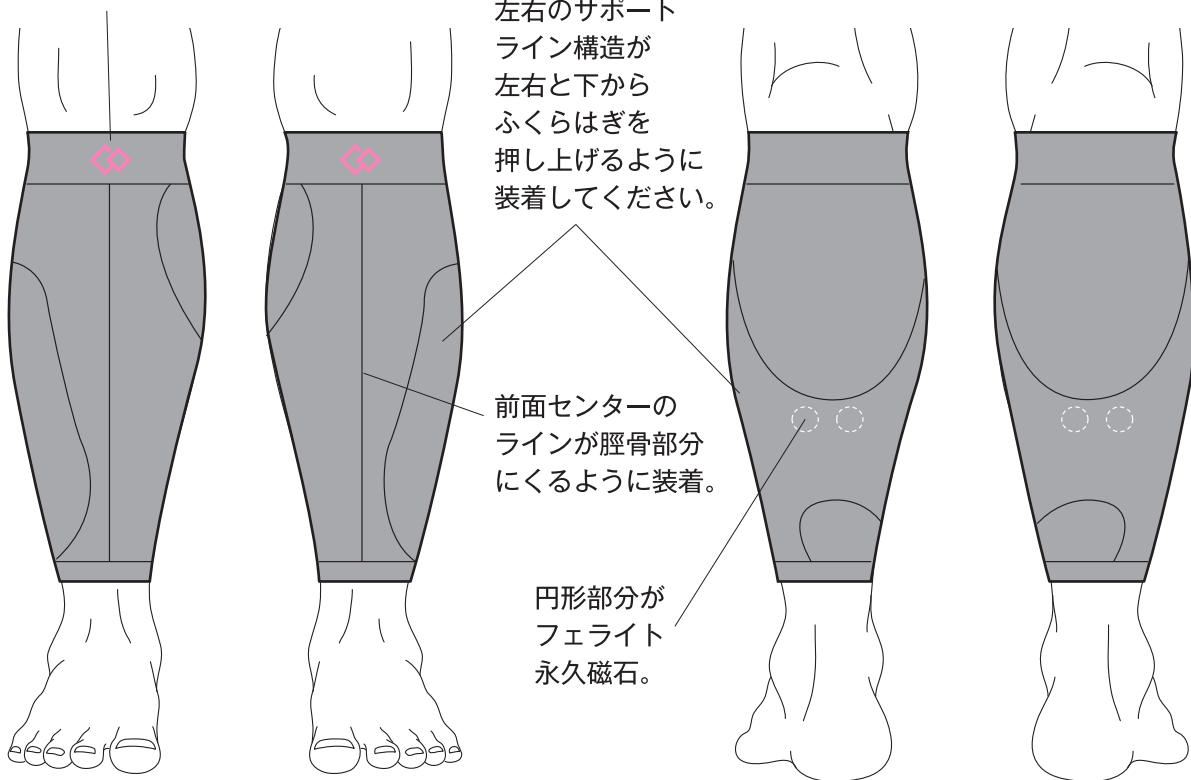

※サポーターを着用される際は、靴下をはく要領で丸めるようにして履いてください。

※着用される際につめを立てて引張りすぎると、破れる恐れがありますのでご注意ください。

## < 取扱説明 >

- 洗濯は中性洗剤をご使用のうえ、押し洗いし水気をきり、形を整えて陰干しして完全に乾いてからご使用ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。ぬれたまま重ね置きすると淡色部や他の物に色移りすることがありますのでご注意ください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- アイロンをあてないでください。
- 水洗いで色落ち、移染の恐れがありますので他の物と分けて洗ってください。
- ドライクリーニングの溶剤でプリントが剥がれることがありますので、ドライクリーニングは避けてください。
- 高温のものに近づけることは避けてください。