

エルボーサポーターのご使用方法

◇のマークのある方が外側です。ひじ関節の内側にサポーター線の交差を合わせてマーク側の円形部分にひじ関節が覆われるように装着してください。その時、ひじの内側左右に磁石部分がくるようにしてください。サポーターは左右どちらにもご使用いただけます。

内側

ひじ関節の内側に
サポーター線の交差を
合わせる。

円形部分が
フェライト永久磁石。

外側

円形部分がひじ関節の位置に
くるように装着してください。

◇マークが腕の外側に
くるように装着してください。

※着用される際につめを立てて引張りすぎると、破れる恐れがありますのでご注意ください。

< 取扱説明 >

- 洗濯は中性洗剤をご使用のうえ、押し洗いし水気をきり、形を整えて陰干しして完全に乾いてからご使用ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。ぬれたまま重ね置きすると淡色部や他の物に色移りすることがありますのでご注意ください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- アイロンをあてないでください。
- 水洗いで色落ち、移染の恐れがありますので他の物と分けて洗ってください。
- ドライクリーニングの溶剤でプリントが剥がれることがありますので、ドライクリーニングは避けてください。
- 高温のものに近づけることは避けてください。