


ニーサポーターのご使用方法

◇のマークのある方が前面です。サポーターの前面、円形部分にひざ関節が覆われるように装着してください。その時、ひざの左右に磁石部分がくるようにしてください。ひざ位置がちゃんと着用位置にきていることを確認して、無理のないように引き上げます。サポーターは左右どちらにもご使用いただけます。

前面

後面

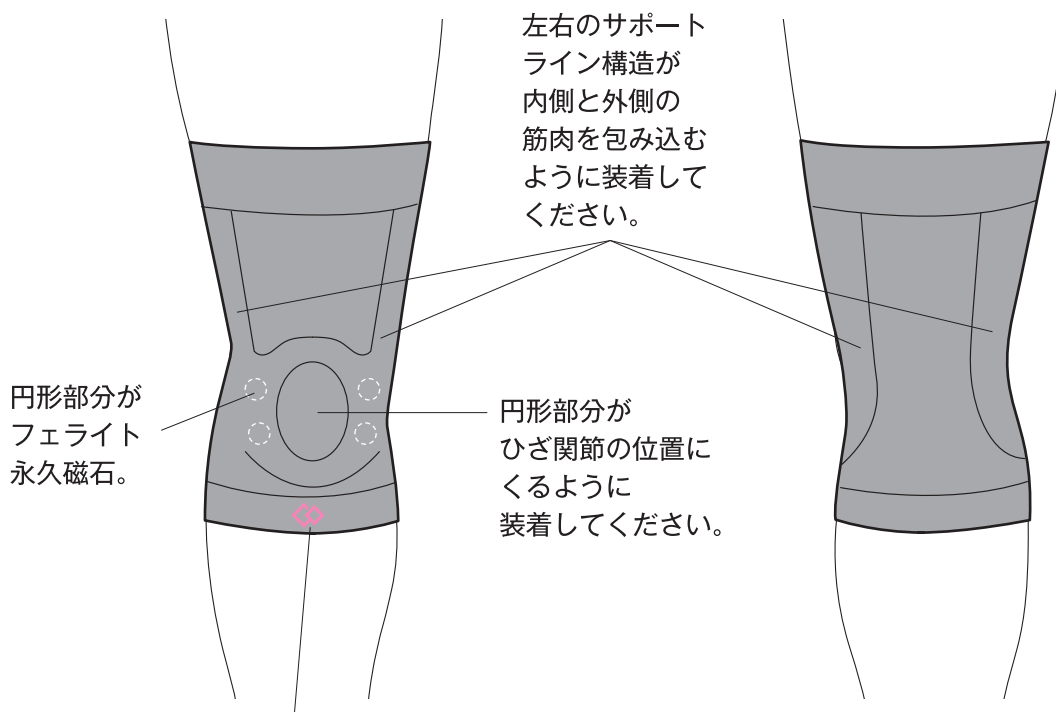

◇マークが下部正面にくるように装着してください。

※着用される際につめを立てて引張りすぎると、破れる恐れがありますのでご注意ください。

< 取扱説明 >

- 洗濯は中性洗剤をご使用のうえ、押し洗いし水気をきり、形を整えて陰干して完全に乾いてからご使用ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。ぬれたまま重ね置きすると淡色部や他の物に色移りすることがありますのでご注意ください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- アイロンをあてないでください。
- 水洗いで色落ち、移染の恐れがありますので他の物と分けて洗ってください。
- ドライクリーニングの溶剤でプリントが剥がれることがありますので、ドライクリーニングは避けてください。
- 高温のものに近づけることは避けてください。