

< 取扱説明 >

- 洗濯の際は磁石パッドをはずし、中性洗剤をご使用のうえ、押し洗いし水気を切り、形を整えて陰干し後完全に乾いてからご使用ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で使用又は長時間放置しないでください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避け下さい。
- アイロンをあてないでください。
- 筋肉痛緩和外用薬との併用はお避け下さい。



コラントッテは模倣品対策に真贋判定・トレーサビリティシステムを導入しています。パッケージにある2次元バーコードの番号をコラントッテのホームページ上の真贋判定サービスに入力することで、商品固有の正式番号か、不正にコピー・捏造された番号かを瞬時に判別できます。<http://trace.colantotte.jp>